

英文名稱	Special Cultivation method for <i>Helicobacter pylori</i>		
中文名稱	胃幽門螺旋桿菌特殊培養法		
健保編號	13030B	健保點數	903
檢體採集	<ol style="list-style-type: none"> 1.於內視鏡檢查時從病患胃體部(body)及胃竇部(antrum)各取一塊組織放入檢體收集管。 2.將含有組織之檢體收集管放入冷藏(2~8°C)或冷凍(-15~-20°C)保存。 3.未能立即送檢者請將檢體收集管放入冷藏(2~8°C)，可放置7天，若放入冷凍(-15~-20°C)，可放置1個月。 		
檢體種類	胃部組織		
容器	檢體收集管(內含惠基選擇性培養基，型號ST)，如右圖		
送檢方式	<p>(一)公司派員</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 收件範圍：台北市、新北市、桃園市。 2. 委託單位電話聯絡檢驗所約定人員收檢時間。 3. 收檢人員攜帶保冷袋(內含保冷劑)至委託單位收取檢體，確認檢體無誤後，將檢體收集管收回檢驗所。 <p>(二)檢體寄送</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請參閱附件一 2. 檢驗所提供寄送所需包材 		
臨床意義	胃幽門螺旋桿菌的感染是導致人體胃部數種疾病的重要因素，包含胃潰瘍、十二指腸潰瘍及胃癌。WHO更確認胃幽門螺旋桿菌為一種致癌因子。		
分析方法	Culture		
參考區間	isolate or no isolate		
報告時效	7個工作天，若培養結果為陽性後續需做藥敏測試，則時長為14個工作天。		
檢驗單位	實驗室	備註	
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 病患若有使用抗生素、鈔劑、益生菌或PPI等，需停藥四週才可進行檢體檢集。 2. 內視鏡檢查當日安排病患一個月後回診。 3. 未使用之檢體收集管請放於室溫保存，避免陽光直射。 		